

COMPEED Plastry na odciski między palcami 10 szt.



Cena: 34,28 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 szt.
Postać	plastry
Producent/ Dystrybutor	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Działanie Compeed działa jak druga skóra.* zapewnia optymalną amortyzację przed ocieraniem i narastaniem nacisku* nawilża i zmiękcza odcisk, aby delikatnie ale skutecznie go usunąć **Wskazania** zastosowanie: w przypadku ciasnych butów, aby pomagać zapobiegać powstawaniu odcisków na istniejące odciski, aby przynieść natychmiastową ulgę w bólu. **Zalecana dzienna porcja do spożycia** Należy umyć i osuszyć zmienione miejsce. Upewnić się, że powierzchnia skóry nie jest natłuszczona kremem ani oliwką. Nie należy stosować produktu COMPEED na zainfekowaną ranę. # W celu uzyskania najlepszych rezultatów, należy ogrzać plaster w dłoni przez jedną minutę. # Najpierw należy zdjąć papier ochronny ze wzorem, oraz większą część białego papieru, delikatnie trzymając plaster za pozostały biały papier. Nie należy dotykać palcami warstwy samoprzylepnej. # Umieścić plaster z wbudowanym dyskiem na odcisku, usunąć pozostały biały papier i dokładnie przykleić plaster upewniając się, że jego brzegi szczelnie przylegają do skóry. # Maksymalnie po 48 godzinach należy zdjąć plaster. Należy zanurzyć zmienione miejsce w ciepłej wodzie na pięć minut przed usunięciem zmiękczonej skóry. Należy powtarzać tę kurację, w zależności od potrzeb przez kolejne 14 dni.