

Corega Super Mocny Delikatny Miętow krem do protez zębowych 70 g



Cena: 30,98 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	70 g
Postać	krem
Producent/ Dystrybutor	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Klej do protez Corega Super Mocny o delikatnym smaku mięty zapewnia mocne i długotrwałe trzymanie protezy zębowej, uszczelnia ją, zapobiegając przedostawaniu się pod jej powierzchnię resztek pokarmu. Znajdująca się w kremie do protez Corega Super Mocny trójskładnikowa sól zapewnia super mocne trzymanie protezy i zapobiega przemieszczaniu się jej podczas spożywania pokarmów. Stosowanie kremu zwiększa siłę zgryzu, komfort żucia i noszenia protezy, a jego miętowy smak zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Nie zmienia smaku pożywienia. **Działanie** Krem mocujący Corega zapewnia mocne utrzymanie protezy zębowej przez cały dzień. Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię, nawet jeśli jest dobrze dopasowana i wykonana. **Składniki** Calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430 **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia** 1. Umyj i wysusz protezę. 2. Nanieś kilka krótkich pasków kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. 3. Wyplucz jamę ustną przed założeniem protezy. 4. Załóż protezę, dociśnij ją i na kilka sekund przygrzyż.