

## SALVEQUICK MED Blister Rescue Plastry na pięty 5 sztuk

Cena: 23,91 pln



### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	5 sztuk
Postać	plastry
Producent/ Dystrybutor	ORKLA CARE S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Charakterystyka** Blister Rescue Original to plaster na pęcherze zawierający innowacyjny opatrunek hydrożelowy, który nie przywiera do pęcherza. Chroni pęcherz, zmniejsza ucisk, dobrze utrzymuje się na miejscu i można go bezproblemowo i bezboleśnie usunąć bez uszkodzenia pęcherza. Ten nowy rodzaj plastra przeznaczony jest na pęcherze, które już zdążyły się uformować. Opakowanie zawiera 5 plastrów na pęcherze specjalnie dostosowanych do pięt. **Jak stosować?** 1. Przemyj ranę i skórę wokół letnią wodą lub płynem do przemywania ran. 2. Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha, czysta i nietłusta, wolna od emulsji i balsamów. 3. Rozedrzyj torebkę ochronną plastra, aby ją otworzyć. 4. Usuń papier ochronny z plastra (oznaczony numerem 1). 5. Ostrożnie przyłóż plaster na środku pęcherza i postaraj się wygładzić zagięcia, jeśli powstały. Następnie usuń białą, złożoną zakładkę. 6. Usuń górną warstwę ochronną z tworzywa sztucznego (oznaczoną numerem 2). Możesz pozostawić plaster do czasu, aż sam się odklei, jednak nie dłużej niż pięć dni. Zmień plaster, jeśli opatrunek żelowy nasiąknie. **Kiedy stosować?** Plaster przeznaczony jest do ochrony pęcherzy, gdy są one nienaruszone, pęknięte lub zdarte. Uwaga: osoby z zaburzeniami procesu gojenia się ran, np. chorzy na cukrzycę, osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać miejsce pęcherza. Nie stosować na krwiste lub głębokie, mocno krwawiące lub zainfekowane pęcherze. **Zawartość opakowania** 5 x 42mm x 72mm