

## COMPEED Plastry na pęcherze na piętach dla aktywnych 5 szt.



Cena: 30,27 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 op. (5 szt.)
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	A&D PHARMA POLAND SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Plastry na pęcherze na piętach Compeed dla osób aktywnych są polecane szczególnie osobom uprawiającym sport. Plaster Compeed działa jak druga skóra, dzięki zawartości aktywnego żelu zawierającego cząsteczki absorbujące wilgoć pomaga utrzymać naturalną wilgotność skóry, oraz przynosi natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez pęcherze, chroni skórę przed powstawaniem otarć, zapewnia szybkie gojenie się ran. **Sposób użycia** Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta pęcherzem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki. Usuń jedną papierową warstwę, następnie drugą, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (uwaga: może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni). Aby usunąć plaster, nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij wzdłuż skóry. **Przeciwwskazania** Plastrów nie należy stosować na zainfekowane rany. **Ostrzeżenia** W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem. Nie powinno się celowo przekłuwać pęcherzy, ponieważ goją się one lepiej pod warstwą zapewniającą ochronę naskórka. Nigdy nie przecinaj plastrów. Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.