

Ferti Lily Kubeczek wspomagający zapłodnienie



Cena: 212,79 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	kubeczek
Producent/ Dystrybutor	SALVEO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Wyrób medyczny, wspomagający zapłodnienie. Produkt został stworzony z myślą o parach, które starają się o dziecko. Umieszcza się go w pochwie po stosunku zakończonym ejakulacją, co utrzymuje nasienie blisko szyjki macicy, w środowisku śluzu szyjkowego. Wyprodukowany w 100% z silikonu medycznego. **Działanie** Stosowanie Kubeczka Ferti Lily pomaga dostarczyć większą ilość nasienia do szyjki macicy i dzięki temu, zwiększyć szansę na zapłodnienie. Utrzymuje on nasienie w niezmiennym pozycji (można bezpiecznie oddawać mocz czy brać prysznic bez obawy, że się wysunie). Kubeczek może pozostawać w pochwie do 1 godziny. Wyrób jest miękki, wygodny i łatwy w aplikacji. Dzięki FERTI·LILY, Twoje szanse na ciążę wzrastają 1,5 – krotnie. Dzięki Kubeczkowi FERTI·LILY starania o dziecko pozostają intymnym momentem, bez lekarzy i procedur medycznych. Kubeczek FERTI·LILY można stosować w każdych warunkach. Możesz przechowywać go w pobliżu łóżka, w załączonym bawełnianym woreczku i zaaplikować bezpośrednio po zbliżeniu, a potem normalnie wstać i robić to, co zwykle. Kubeczek jest miękki, komfortowy w użyciu, a jego stosowanie nie zakłóca intymnych chwil. **Przeciwwskazania i środki ostrożności** Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.