

OneTouch Delica Plus nakłuwacz



Cena: 23,34 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	nakłuwacz
Producent/ Dystrybutor	NEUCA S.A.
Rejestracja	Wyr6b medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Nakłuwacz **OneTouch Delica Plus** pozwala na pobranie kropli krwi w6łniczkowej z opuszki palca w bezpieczny i łatwy sposób, umożliwiając dokonanie pomiaru cukru we krwi. Nakłuwacz **OneTouch Delica Plus** posiada 13 ustawie6 g6łbokości wkłucia. Wybrana g6łbokość ustawienia musi być wystarczająca do uzyskania okrągłej kropli krwi, której wielkość umożliwi glukometrowi podanie wyniku pomiaru poziomu cukru we krwi. OneTouch Delica Plus ma zmniejszone vibracje ostrza dla wygodnego i precyzyjnego dokonywania badania. Cienkie ostrza 30 G z powłoką silikonową zapewniają podwyższony komfort użytkownikowi. OneTouch Delica Plus zalecany jest do użyciu z ostrzami OneTouch Delica Plus i OneTouch. **Zawartość** Zawartość zestawu 1 nakłuwacz OneTouch Delica Plus Instrukcja obsługi **Spos6b użycia** Zdjąć zatyczkę nakłuwacza. W celu zdjecia zatyczki nalezy najpierw przekrecić ją, a następnie pociagnąć ją w linii prostej. Zabezpieczyć odsłoniętą końcówkę ostrza. Przed wyjeciem ostrza z nakłuwacza umieścić osłonę ostrza na twardej powierzchni i wcisnąć końcówkę ostrza w płaską część osłony. Wyszunąć ostrze. Trzymając nakłuwacz skierowany do dołu, przesunąć suwak do przodu, aż ostrze wysunie się z nakłuwacza. Jeśli ostrze nie zostanie prawidłowo wysunięte, nalezy ponownie naciagnąć przycisk napinający, a następnie przesunąć suwak do przodu, aż ostrze zostanie wysunięte. Założyć zatyczkę nakłuwacza Nałożyć zatyczkę z powrotem na nakłuwacz. Przekrecić lub wcisnąć zatyczkę, aby odpowiednio ją zabezpieczyć. Upewnić się, że zatyczka jest wyrównana w sposób pokazany na rysunku. Nalezy zachować ostrożność podczas użycia zużytego ostrza po każdym użyciu, aby uniknąć przypadkowego zranienia. W regionie użytkownika zużyte ostrza mogą być uznawane za odpady biologicznie niebezpieczne. W celu odpowiedniej ich użycia nalezy przestrzegać zalece6 pracowników służby zdrowia lub przepis6w lokalnych.