

BOBO Test ciążowy płytkowy 1 szt.

Cena: 9,40 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	test
Producent/ Dystrybutor	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

SkładZawartość opakowania: instrukcja użycia, płytki testowe, pipetka. **Działanie**Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak. Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mIU/ml. **Wskazania**BOBO - TEST płytkowy - to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. **Dawkowanie** Sposób użycia: Zanim przeprowadzisz test zberz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku. Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu. Rozerwij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę. Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu. Ściskając szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu. Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieść w nim 3-4 krople moczu. Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza. Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test. **Informacja**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.