

## SOPELEK 3 Aspirator vacuum



Cena: 36,86 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	aspirator
Producent/ Dystrybutor	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Aspirator do nosa SOPELEK3+ w dwóch wersjach: odciąganie za pomocą ust oraz odciąganie za pomocą odkurzacza, umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania. Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc). Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne dla niemowląt SOPELEKbaby mają zastosowanie w trakcie przewijania dziecka w domu, przychodni czy podróży.

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ASPIRATOR DO NOSA SOPELEK3+ –ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ UST.** Metoda może służyć zarówno do codziennej higieny noskajak i do usuwania zalegającej wydzieliny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić wszystkie elementy czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.

1. Włóż jednorazowy filtr do końcówki
2. Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem na cylinder główny aspiratora.
3. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka.
4. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik najpierw w jednym, następnie drugim otworze nosowym.
5. Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem z cylindra głównego. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie (ok. 90stC) przez max. 15 sekund.
6. Wysusz wszystkie elementy i ułóż ponownie w pudełku.

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ASPIRATOR DO NOSA SOPELEK3–ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA.** Metoda może służyć tylko do usuwania zalegającej wydzieliny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.

1. Włóż jednorazowy filtr do korka, a następnie korek do cylindra głównego. Nałóż końcówkę na cylinder główny aspiratora, a wąż połącz z adapterem z jednej strony i korkiem z drugiej.
2. Włóż adapter do rury ssącej odkurzacza, odsuń odkurzacza na max. odległość od dziecka, następnie włącz urządzenie. Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o mocy 500-1000 W.
3. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę Aspiratora w pobliże jednego, następnie drugiego otworu nosowego dziecka (odciąganie powinno trwać max. 5 sekund, ruch góra- dół).
4. Wyłącz odkurzacza, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z cylindra głównego i jednorazowy filtr z korka. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie (ok. 90stC) przez max. 15 sekund. Adapter i wężyk nie wymagają wyparzania, wystarczy przemyć ciepłą wodą.
5. Wysusz wszystkie elementy i ułóż w pudełku.

**BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA** Z uwagi na umieszczony w korku adaptera otwór bezpieczeństwa siła ssąca

odkurzacza jest zredukowana, dzięki czemu aspirator jest bezpieczny przy stosowaniu u dzieci. Aspirator SOPELEK3+ wyróżnia się tym, że odciągana wydzielina przy zastosowaniu siły ssącej odkurzacza jest zatrzymywana na filtrze umieszczonym w koreczku. 1. Jeżeli błona śluzowa nosa dziecka jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub specjalnego donosowego roztworu wody morskiej. 2. Aspirator SOPELEK3+ przechowuj w opakowaniu (pudełku) w suchym i czystym miejscu. 3. Proces odciągania wydzieliny z nosa dziecka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą. 4. Do procesu odciągania można zastosować odkurzaczy o max mocy 1000 Wat. 5. Nie stosować aspiratora w przypadku uszkodzeń błony śluzowej nosa, krwawienia lub hemofilii. 6. Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne Sopelek baby są przeznaczone do użytku jednorazowego. Podkłady uszkodzone, zawilgocone lub mokre nie nadają się do użycia.