

## SALVEQUICK MED Blister Rescue Mix Plastry na pęcherze 6 sztuk



Cena: 33,87 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plastry
Producent/ Dystrybutor	ORKLA CARE S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Charakterystyka** Blister Rescue Mix to zestaw plastrów na pęcherze na pięty i palce u stóp z innowacyjnym opatrunkiem hydrożelowym, który nie przywiera do pęcherza. Chronią pęcherz, zmniejszają ucisk, dobrze utrzymują się na miejscu i można je bezproblemowo i bezboleśnie usunąć bez uszkodzenia pęcherza. Ten nowy rodzaj plastra przeznaczony jest do ochrony pęcherzy, które już zdążyły się uformować. Opakowanie zawiera 3 plastry na pęcherze specjalnie dostosowane do pięt i 3 plastry do palców u stóp. **Jak stosować?** 1. Przemyj ranę i skórę wokół letnią wodą lub płynem do przemywania ran. 2. Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha, czysta i nietłusta, wolna od emulsji i balsamów. 3. Rozedrzyj torebkę ochronną plastra, aby ją otworzyć. 4. Usuń papier ochronny z plastra (oznaczony numerem 1). 5. Ostrożnie przyłóż plaster na środku pęcherza i postaraj się wygładzić zagięcia, jeśli powstały. Następnie usuń białą, złożoną zakładkę. 6. Usuń górną warstwę ochronną z tworzywa sztucznego (oznaczoną numerem 2). Możesz pozostawić plaster do czasu, aż sam się odklei, jednak nie dłużej niż pięć dni. Zmień plaster, jeśli opatrunek żelowy nasiąknie. **Kiedy stosować?** Plaster przeznaczony jest do ochrony pęcherzy, gdy są one nienaruszone, pęknięte lub zdarte. Uwaga: osoby z zaburzeniami procesu gojenia się ran, np. chorzy na cukrzycę, osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać miejsce pęcherza. Nie stosować na krwiste lub głębokie, mocno krwawiące lub zainfekowane pęcherze. **Zawartość opakowania** 3 x 72mm x 42mm 3 x 56mm x 24mm