

Mucovagin Żel 25g

Cena: 50,67 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	25 g
Postać	żel
Producent/ Dystrybutor	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina.

Wskazania Żel dopochwowy i na zewnętrzne okolice intymne z kwasem hialuronowym 5 mg. Wspomaga procesy gojenia i regeneracji błony śluzowej pochwy. Ułatwia leczenie i gojenie się ran po porodzie, zabiegach i operacjach ginekologicznych. Łagodzi stany zapalne i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością śluzówki pochwy po porodzie, w okresie karmienia piersią, podczas antykoncepcji hormonalnej lub na skutek menopauzy, przy despauzenii (ból przy współżyciu). **Dawkowanie** Mucovagin żel należy używać wewnętrznie, miejscowo dopochwy lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych. Przed użyciem żelu należy dokładnie umyć ręce: Sposób użycia 1. Przed pierwszym użyciem usunąć zamknięcie z tubki. 2. Przykręcić jednorazowy aplikator do tubki. 3. Delikatnie napętnić aplikator do pożądanej ilości żelu. Standardowo jest to 2,5ml. Odłączyć aplikator od tubki. Po każdym użyciu zakręcić tubkę. 4. Nie przechowywać żelu w aplikatorze przez czas dłuższy niż 30 minut przed użyciem. Oznacza to, że niezuty żel w aplikatorze w ciągu 30 minut należy wyrzucić wraz z aplikatorem. 5. W pozycji leżącej wprowadzić delikatnie aplikator głęboko do pochwy i nacisnąć tłok do oporu. 6. Wyjąć obie części aplikatora z pochwy. 7. W celu uzyskania właściwego nawilżenia pochwy, po podaniu produktu należy lekko przeć. 8. W razie potrzeby można usunąć jednorazową chusteczką nadmiar żelu znajdującego się na sromie. 9. Po użyciu wyrzucić aplikator nie używać ponownie aplikatorów.