

PROTEFIX HIGIENA ACTIV Tabletki czyszczące 66 tabletek



Cena: 41,83 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	66 sztuk
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Aktywne tabletki czyszczące **PROTEFIX HIGIENA** ułatwiają codzienną pielęgnację protez zębowych i jamy ustnej. Usuwiają osady z protez i aparatów ortodontycznych, dezynfekują je, a także eliminują powstawanie przykrego zapachu. Działanie tabletek chroni jamę ustną przed bakteriami sprzyjającymi powstawaniu stanów zapalnych i usuwa przebarwienia i trudne osady (np. z kawy czy herbaty). Aktywny tlen zawarty w tabletkach dociera do trudno dostępnych miejsc, co pozwala zapewnić higieniczną czystość protezy. **Działanie** Z siłą aktywnego tlenu usuwiają trudne osady usuwiają bakterie likwidują przykry zapach. Aktywne tabletki Protefix HIGIENA dezynfekują protezę lub aparat ortodontyczny i zapewniają ich higieniczną czystość. Usuwiają najtrudniejsze osady z kawy i herbaty oraz likwidują kamień nazębny. Dzięki temu chronią jamę ustną przed szkodliwymi bakteriami, będącymi źródłem stanów zapalnych i przykrego zapachu. Tabletki Protefix - regularnie stosowane - zapewniają uczucie świeżości. Aktywny tlen działa gruntownie i bezpiecznie: dociera do niedostępnych zagłębień i nie uszkadza materiału protezy. **Skład** Sódium Bicarbonate, Potassium Caroate, Sódium Perborate, Citric Acid, Sódium Lauryl Sulfate, Peppermint (aroma), CI 73015 (color). **Zawartość** 66 tabletek (w 6 blistrach) **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia** Oczyszczyć protezę lub aparat przy pomocy szczoteczki. Wrzucić jedną tabletkę Protefix do pół szklanki letniej lub ciepłej wody. Włożyć protezę do musującego roztworu tak, by była ona całkowicie zanurzona. Po ok. 15 minutach* wyjąć protezę i dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.*lub po 3 minutach, jeśli oczekiwany jest jedynie efekt oczyszczenia.