

Test FLUORECARE RSV+COVID+GRYP A/ B 1 szt.

Cena: 19,50 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Hiszpania
Opakowanie	1SZT.
Postać	test diagnostyczny
Producent/ Dystrybutor	AMS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Test FLUORECARE COVID-19 Grypa A+B, RSV Combo Test FLUORECARE jest testem immunochromatograficznym, który jest przeznaczony do szybkiego wykrywania antygenów wirusa Covid-19, wirusa grypy A/B oraz wirusa RSV. Jest to test do samokontroli w warunkach domowych. Można go stosować zarówno u osób z widocznymi objawami, jak i bez nich. Wyrób medyczny FLUORECARE wykorzystuje się do samokontroli w warunkach domowych. Widząc u siebie bądź bliskich objawy choroby, zalecane jest wykonanie testu w celach potwierdzenia jednego z wirusów. Test można stosować od 2 roku życia. **Sposób użycia** Testu FLUORECARE Grypa A/B + COVID-19/RSV: Przed zrobieniem testu umyj ręce oraz zdezynfekuj je. Odkręć zakrętkę probówki i usuń niebieski korek, a następnie włóż probówkę do otworu na opakowaniu Wyjmij kartę testową z opakowania i odłóż na bok. Pobierz próbkę wymazu z nosa. Wprowadź na głębokość 2.5 cm wymazówkę do jednej z dziurek nosa, następnie obróć nią 5 razy aby zebrać próbkę ze ścianek nosa. Powtórz tę czynność w drugim nozdrzu. Umieść próbkę wymazu w probówce, przerwij wymaz w wiążle wymazowym i zostaw dolną połowę patyczka w probówce. Zamknij pokrywę probówki. Przyciśnij wymazówkę 10 razy w probówce, a następnie odczekaj 1 minutę. Po tym czasie odkręć zacisk znajdujący się w górnej części pokrywki, aby umożliwić kapanie płynu. Na karcie testu w studzienkach oznaczonych literami "S" umieść po 2 krople z probówki. Wyniki są gotowe do odczytania po 15 minutach. Wynik testu na Covid-19 i RSV POZYTYWNY jeżeli w miejscu "T" oraz "C" pojawiły się linie. NEGATYWNY jeżeli pojawiła się tylko jedna kreska w miejscu "C" NIEWAŻNY jeżeli nie pojawiła się linia w miejscu "C" Wynik testu na grypę A/B POZYTYWNY na grupę A jeżeli w miejscu "A" i "C" pojawiły się kreski || na grupę B jeżeli w miejscu "B" i "C" pojawiły się kreski || na grupę A i B jeżeli pojawiły się kreski w miejscu "A", "B" i "C" NEGATYWNY jeżeli pojawiła się tylko jedna kreska w miejscu "C" NIEWAŻNY jeżeli nie pojawiła się kreska w miejscu "C" Po zakończeniu testu i odczytaniu wyników należy umieścić każdy element testu w woreczku foliowym i wyrzucić do kosza na śmieci. Następnie należy umyć i odkazić ręce. Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE. Posiada deklarację zgodności UE Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim Zawiera etykietę w języku polskim Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.