

Corega Tabs Intensiv Reiniger Tabletki do czyszczenia protez 108 tabletek



Cena: 29,71 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	108 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Corega tabs Czyszczenie protez działa trójfazowo: usuwa nieprzyjemny zapach, czyści nie uszkadzając powierzchni, usuwa przebarwienia. Do codziennego stosowania zamiast pasty do zębów, dla zachowania czystych i lśniących zębów. Nie zawiera substancji ścierających i czyści protezę dokładnie i delikatnie. **Działanie** Usuwa 99,9% nieprzyjemnego zapachu z ust spowodowanego przez bakterie. Wysokiej jakości olejek miętowy zapewnia wysoką świeżość. Skutecznie usuwa bakterie, które mogą podrażniać dziąsła. **Skład** Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Carbonate, TAED, Sodium Beznoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, VP/VA Copolymer, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015. **Stosowanie** 1. Jedną tabletkę wrzucić do ciepłej wody (nie może być gorąca), tak żeby proteza była w wodzie. 2. Sztuczną szczękę wyjąć ze szklanki po 15 minutach i oczyścić miękką szczoteczką. 3. Protezę opłukać pod bieżącą wodą, a pozostałość roztworu po płukaniu wylać. **Przeciwwskazania** Tabletek czy roztworu do płukania nie brać do ust. Zabrania się picia roztworu czy też używania go jako płynu do płukania ust. Unikać kontaktu tabletek czy roztworu z oczami bądź ustami. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik tabletek Corega Tabs.