

## Opatr.Actisorb Plus 10,5x10,5cm 1 szt.



Cena: 18,70 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Wielka Brytania
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Działanie**Opatrunek stosowany w leczeniu ran zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzieliną ropną. Działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie dzięki zawartości srebra. **Wskazania**- owrzodzeniach podudzi;- owrzodzeniach nowotworowych;- odleżynach, przelotkach kałowych.**Sposób użycia**Opatrunek zakłada się bezpośrednio na ranę, po uprzednim przemyciu jej roztworem soli fizjologicznej 0,9% NaCl. Nie należy usuwać otuliny, w której znajduje się filtr węglowy, zabezpiecza ona przed rozejściem się opatrunku w ranie i przejściem cząsteczek węgla w głąb rany. W przypadku dużego wysięku z rany Actisorb\* Plus można pokryć dodatkowym opatrunkiem wchłaniającym (np. kompres włókninowy Topper\* lub opatrunek hydropolimerowy TIELLE\*). Opatrunek może pozostać na ranie do 7 dni. W początkowej fazie leczenia, z dużą ilością treści ropnej, może istnieć konieczność wymiany opatrunku co 24h lub częściej. W późniejszej fazie gojenia zmieniać co 3 - 7 dni lub w przypadku ponownego pojawienia się zapachu. OpatrunkuActisorb\* Plus nie wolno ciąć ponieważ istnieje ryzyko uwolnienia włókien do rany i jej przebarwienie.