

Langsteiner Plastry na odciski z kwasem salicylowym 8 sztuk



Cena: 21,24 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	8 sztuk
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	LANGSTEINER SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Acidum salicylicum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Plastry na odciski z kwasem salicylowym. Wyrób medyczny. Stosowane do łagodnego usuwania odcisków i zabezpieczania ich przed dodatkowymi urazami. Plaster zawiera 19,25 mg kwasu salicylowego oraz 0,671 mg kwasu mlekowego. Posiadają pierścień, który redukuje ucisk i chroni przed otarciem. Plastry samoprzylepne, o długości 65 mm. **Skład** Kwas salicylowy, kwas mlekowy, lanolina, wosk pszczeleli żółty, żywica świerkowa, kopolimer etylenu i octanu winylu, kłaczce kosaćca, kompleks miedziowy chlorofilu, terpentyna, balsam (olejek) kopaiwa, klej poliakrylatowy – Durotak, kalafonia uwodorniona, włóknina, papier. **Działanie** Plastry na odciski z kwasem salicylowym redukują ucisk na bolące miejsce, chronią przed otarciami oraz pomagają skutecznie i bezpiecznie usuwać odciski i modzele. **Sposób użycia** Na czystą i suchą stopę nałożyć plaster tak, aby substancja czynna przylegała do odcisku. Stosować plastry do momentu, aż odcisk zostanie usunięty. Każdy plaster należy nałożyć na ok. 24 godziny. Po zakończeniu kuracji można usunąć środkową część odcisku stosując ciepłą kąpiel stóp z użyciem soli i mydła. Jeżeli w trakcie zabiegów skóra stanie się wrażliwa i pojawi się zaczerwienienie, poczekać z nałożeniem kolejnych plastrów. **Przeciwwskazania i środki ostrożności** Nie nakładać plastra na okolice odcisku, jeżeli skóra jest podrażniona lub występują stany zapalne. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.