

## KICK the TICK EXPERT Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy 1 szt.



Cena: 49,06 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt. (zestaw)
Postać	zest.
Producent/ Dystrybutor	ICB PHARMA SP. J.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Zestaw przeznaczony do usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt. Działanie KICK THE TICK polega na zamrożeniu i zatrzymaniu funkcji fizjologicznych żerującego kleszcza, przez co hamuje możliwość przekazania czynników chorobotwórczych podczas usuwania pasożyta. Zamrożenie miejsca przyczepienia powoduje ponadto miejscowe znieczulenie i łagodzi ból związany z zabiegiem usuwania kleszcza. Technologia APRF (Anti-Parasite Removal Film) zastosowana w wyrobie KICK THE TICK powoduje dokładne pokrycie preparatem kleszcza i miejsca przyczepienia pasożyta. Uzyskany efekt chroni przed rozerwaniem powłok ciała pasożyta, skutecznie ograniczając ryzyko przeniesienia zarazków. **Zastosowanie** W profilaktyce chorób odkleszczowych, m.in.: boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy. Niezbędny w domowej apteczce w miesiącach: od marca do końca listopada. **Sposób użycia** Zamroź kleszcza, a następnie przy pomocy odpowiednio dobranej końcówki przyrządu do usuwania kleszczy należy mocno uchwycić przyczepionego kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry. Zdecydowanym ruchem ku górze wyciągnąć kleszcza. Sprawdzić czy w miejscu wkłucia nie pozostały jeszcze fragmenty ciała kleszcza. Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza. Dokonać utylizacji usuniętego kleszcza lub umieścić w próbówce w celu wykonania badań laboratoryjnych. Po użyciu przyrządu należy go zdezynfekować oraz dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować. **Składniki** Izoheksadekan+mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan (gaz pędny). **Ważne wskazówki** Bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie zawiera środków owadobójczych. Zawartość zestawu zawiera ok. 60 dawek, to pozwala na bezpieczne usunięcie do 20 kleszczy.