

Koc ratunkowy 210cm x 160cm 1 szt. PASO-TRADING

Cena: 9,94 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Wskazania Koc ratunkowy wykorzystywany jest głównie w celu ochrony organizmu przed wyziębieniem lub przegrzaniem **Sposób użycia** Koc należy rozłożyć na całą szerokość i okryć poszkodowanego. Nie przykrywać twarzy. Ewentualnie brzegi koca skleić plastrem, taśmą lub związać. **W celu ochrony poszkodowanego przed zimnem** należy okryć go srebrną stroną koca - umożliwia to reflektowanie ciepła ciała i zmniejsza ryzyko wychłodzenia, **W celu ochrony poszkodowanego przed przegrzaniem** należy okryć go złotą stroną koca - za sprawą tego reflektowanie promieni słonecznych nie pozwala na nagrzewanie ciała. **Skład** folia z tworzywa sztucznego