

HelpMedi DinoRino Ustny aspirator kataru 1 sztuka

Cena: 29,29 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	aspirator
Producent/ Dystrybutor	ACTIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

DinoRino, aspirator ustny kataru to wyrób medyczny przeznaczony do oczyszczania nosa u najmłodszych już od pierwszych dni życia. Sprawdzi się w przypadku alergicznych czy wodnistych katarów, jak również podczas codziennego oczyszczania noska z drobnych zanieczyszczeń. Ergonomiczny kształt aspiratora, dopasowana końcówka ustnika do ust oraz konstrukcja składająca się z komory na wydzielinę z filtrem, przewodu i ustnika zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Do wyrobu zostały dołączone nakładki antystresowe. **Zawartość opakowania** DinoRino, aspirator ustny kataru HelpMedi, 1 sztuka. Przeznaczenie produktu Dla dzieci w wieku 0 m+. **Wskazania** Wyrób przeznaczony do codziennej higieny noska najmłodszych oraz w przypadku lekkiego kataru, również alergicznego, w celu udrożnienia nosa. **Sposób użycia wyrobu medycznego** Przed przystąpieniem do oczyszczania należy niewielką ilością soli fizjologicznej zakropić noskę dziecka. Następnie umieścić filtr w komorze i połączyć ze sobą obie części komory (dopuszcza się używanie aspiratora bez filtra). W celu oczyszczenia noska należy wziąć ustnik w usta, a koniec komory przykładając naprzemiennie do otworów noska dziecka i poprzez zaciąganie powietrza dokonać aspiracji. Czynność należy powtarzać do czasu całkowitego pozbycia się wydzieliny z nosa. Po zakończeniu oczyszczania należy rozpiąć komorę, ściągnąć nakładkę i umieścić ją w suchym miejscu. Filtr należy usunąć, a komory dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem lub płynem do naczyń i wysuszyć.