

Sterimar Baby Spray do nosa 100 ml



Cena: 45,37 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Dawka | - |
| Kraj produkcji | Francja |
| Opakowanie | 100 ml |
| Postać | aer.do nosa |
| Producent/ Dystrybutor | SOFIBEL-LAB.FUMOUBE |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

DziałanieSzczególnie zalecany do higieny nosa niemowląt i małych dzieci. W pielęgnacji pomaga oczyścić nos, ułatwia oddychanie oraz karmienie. Przywraca wysuszonym śluzówkom ich prawidłowe, fizjologiczne funkcje. W przypadku zatkanego nosa przywraca drożność i komfort oddychania, pozwala usunąć śluz.**Sposób użycia**Przed pierwszym użyciem należy uwolnić jedną dawkę w powietrze w celu uruchomienia systemu mikrodyfuzji. Delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora. Oczyścić końcówkę aplikatora wodą z mydłem, a następnie opłukać i osuszyć. Stosować 2-6 aplikacji dziennie do każdego otworu nosowego.**Skład**Woda morska: 31,82 ml, woda oczyszczona do 100 ml. Zawiera mikroelementy i pierwiastki śladowe pochodzące z wody morskiej: miedź, mangan, selen, cynk, żelazo.