

## Help4skin Gojenie ran żel 20 g



Cena: 29,94 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 g
Postać	żel
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie. Help4Skin Gojenie ran sprzyja procesowi gojenia, gdyż pomaga regulować mikrośrodowisko rany. Nadaje się do stosowania przy ranach suchych i wilgotnych. Działanie Unikalny preparat z karbomerem stabilizowanym karnozyną, która działa buforująco na kwaśne polimery (jak przeciwutleniacz). Wykorzystanie takiego składnika czynnego gwarantuje wysoką skuteczność w leczeniu ran suchych i wilgotnych. Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie Help4Skin Gojenie ran przyspiesza proces gojenia rany, regulując jej mikrośrodowisko. W przypadku ran suchych działa okluzyjnie, zmniejszając przesnaskórkową utratę wilgoci. W przypadku ran wilgotnych oraz ran sączących się preparat absorbuje nadmiar wilgoci, a także zmiękcza miejsce kontaktu z plasterem lub bandażem. Preparat nie przywiera do rany. Można stosować go także przy ranach i owrzodzeniach stóp, które są powikłaniem stanów cukrzycowych, przy czym zastosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem. **Sposób użycia** Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Na zamknięte rany (oczyszczone i zdezynfekowane) należy nakładać preparat, bezpośrednio ją spryskując. Po aplikacji można założyć bandaż lub plaster. Na otwarte rany preparat można nałożyć dopiero po jej oczyszczeniu, zdezynfekowaniu i osuszeniu sterylną gazą. Żel nakładać grubą warstwą, założyć bandaż lub plaster. Opatrunek powinien być zmieniany przynajmniej raz dziennie. Po pojawieniu się strupa, należy zmniejszyć ilość aplikowanego żelu. **Skład** Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.