

SUTRICON Plastry silikonowe n/blizny 5x30c



Cena: 138,81 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 op. (5 szt.)
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Plastry silikonowe na blizny Sutricon przeznaczone są do blizn pooperacyjnych blizn poparzeniowych blizn po cesarskim cięciu blizn pourazowych w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu u dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (nawet do 9 lat).

Stosowanie Plastry silikonowe mogą być używane zarówno przez dzieci (od 6 miesiąca życia) jak i dorosłych. Przy stosowaniu plastrów należy przede wszystkim dopasować ich wielkość, odpowiednio docinając plaster do wielkości blizny pozostawiając 5 mm margines z każdej strony. Ważna jest także regularna wymiana plastrów. Jeden plaster może być stosowany od 3 do 5 dni, przy codziennym zdjęciu plastra, przemyciu blizny, dokładnym osuszeniu a następnie ponownym naklejeniu tego samego plastra. Należy pamiętać, że długość terapii jest zależna od wielu czynników indywidualnych, jednak są to minimum 3 miesiące przy świeżych bliznach, a przy bliznach starszych nawet powyżej pół roku stosowania plastrów.

Czas terapii plasterami Sutricon Ważną kwestią jest czas terapii, czyli jak długo należy stosować plastry Sutricon. Efekty można zaobserwować już po miesiącu, jednak pełna kuracja jest dłuższa i zależy od wielu czynników indywidualnych. Najważniejsze to wielkość i rodzaj blizny, a także uwarunkowania genetyczne. Blizny najszybciej goją się u dzieci, natomiast u osób starszych czas potrzebny na pełną regenerację skóry jest najdłuższy. Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją używania. **Długość terapii to średnio** min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych. Przy skłonnościach do nieprawidłowego bliznowacenia, np. keloidów czy bliznowców zaleca się stosowanie plastrów Sutricon przez cały okres przebudowy blizny, nawet do 1 roku.

Jak używać plastrów Sutricon Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią dołączonej do opakowania ulotki, ponieważ powodzenie terapii zależy od prawidłowego stosowania preparatu Sutricon. Plaster można używać po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób. Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając je co 24 godziny.

Docinamy na wymiar Plaster silikonowy należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony. **Dzielimy na części** Przy bliznie o rozmiarach 0,5 x 13 cm z jednego, dużego opakowania można uzyskać 30 mniejszych plastrów. **24h aktywnego działania** Aktywne działanie przez cały dzień. Plastry silikonowe na blizny Sutricon można nosić przez całą dobę. Jednak przynajmniej raz na dobę należy je zdjąć, bliznę umyć neutralnym mydłem, wysuszyć i nałożyć ten sam plaster ponownie. **1 plaster = 3-5 dni** Jeden plaster Sutricon można

nosić do 5 dni, jeśli jest zachowany w czystości oraz utrzymuje właściwości adhezyjne. Uwaga! Plastra nie należy myć ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem. **1-3 miesięcy terapii** Jedno opakowanie wystarcza na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju blizny. **Składniki** Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.