

## Accu-Chek FastClix AST nasadka do nakłuwacza 1 szt.



Cena: 58,98 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	ROCHE DIAGNOSTICS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Accu-Chek FastClix AST to nasadka przeznaczona do użytkowania z nakłuwaczem Accu-Chek FastClix AST Kit. Nakłuwacz Accu-Chek wyposażony w nasadkę umożliwia wykonanie wkłucia w miejscach alternatywnych dla opuszka palca. Jest to tzw. metoda AST, która pozwala na uzyskanie próbki krwi potrzebnej do wykonania samodzielnego badania poziomu stężenia glukozy we krwi. Nałożenie nakładki jest proste i szybkie. Accu-Chek FastClix AST sprawdzi się dla pacjentów, którzy mają trudności z wykonaniem wkłucia w obrębie opuszka palca - co zdarza się u osób, które często muszą wykonywać pomiary w ciągu dnia. Alternatywne miejsca nakłucia mogą stanowić: dłoń, przedramię, ramię, udo lub łydka. Parametry techniczne nasadka Accu-Chek FastClix AST: nakładka wykorzystuje metodę AST - umożliwia wykonywanie nakłucia w miejscach alternatywnych, takich jak: dłoń, przedramię, ramię, udo lub łydka nasadka jest kompatybilna ze nakłuwaczem: Accu-Chek FastClix AST Kit **Działanie** Służy do pobierania krwi z alternatywnych części ciała. **Sposób użycia** Zdjąć czarną nasadkę z nakłuwacza. Nałożyć szarą nasadkę AST. Znajdujące się na krawędzi nasadki wgłębienie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakłucia (srebrny pasek) muszą się przy tym zazębnić. Nasadka musi wyraźnie i wyczuwalnie "zaskoczyć" na swoje miejsce. Obracać nasadkę AST do momentu ustawienia na wskaźniku pożądanej głębokości nakłucia. W celu otrzymania wystarczająco dużej kropli krwi nakłucie w alternatywnych częściach ciała musi być głębsze niż na opuszcze palca. ogólnie rzecz biorąc miejsc atę są mniej wrażliwe na ból. Wybrać miękkie miejsce i przemyć je ciepłą wodą z mydłem. Pozostawić skórę do dokładnego wyschnięcia. Nakłuwacza należy używać wyłącznie z osadzoną nasadką AST. Bez nasadki lancet wbija się zbyt głęboko, co powoduje powstanie bolesnego ukłucia. Mocno docisnąć nakłuwacz do wybranego miejsca nakłucia. Wcisnąć do oporu przycisk spustowy. Powoduje to uruchomienie lancetu i nakłucie skóry. Zdjąć nakłuwacz z miejsca nakłucia. Następnie zdjąć z nakłuwacza nasadkę AST. Przycisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia. Otwór w nasadce AST należy umiejscowić na skórze w tym samym miejscu, jak podczas nakłucia. Tylko w ten sposób można uzyskać kroplę krwi o odpowiedniej wielkości oraz zapobiec kontaktowi nasadki AST z krwią. Przeprowadzić pomiar stężenia glukozy we krwi według instrukcji obsługi posiadanego glukometru. Ponownie założyć na nakłuwacz jedną z dwóch nasadek.