

UniGel Apotex Procto 5 czopków

Cena: 38,02 pln



Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Dawka | - |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Opakowanie | 5 czopków |
| Postać | czopki do odbytnicze |
| Producent/ Dystrybutor | APOTEX NEDERLAND B.V. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |
| Wsyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

UniGel Apotex Procto to wyrób medyczny, który wspomaga proces gojenia zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy: - szczelin odbytu - hemoroidów - u pacjentów po zabiegu leczenia hemoroidów metodą Barrona (Ligatura Barrona)

Skład UniGel Apotex Procto to biały czopek o kształcie torpedy, zawierający sproszkowany kopolimer HEMA-HAS oraz bazę tłuszczową.

Zawartość 5 czopków **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia** W miejscu perforacji blistra należy oddzielić jeden czopek od całego opakowania, lekkim szarpnięciem otworzyć jednostkowe opakowanie i wyjąć czopek. Czopki wprowadza się do odbytnicy, o ile to możliwe, po wypróżnieniu i podmyciu się. Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrozonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, czopki UniGel Apotex Procto należy stosować raz na dobę, najlepiej przed snem.