

Akutol stop spray 60 ml elastyczny opatrunek w aerozolu

Cena: 28,99 pln



Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Dawka | - |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 60 ml |
| Postać | opatr.elast.w aeros. |
| Producent/ Dystrybutor | SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

DZIAŁANIE AKUTOL STOP spray przeznaczony jest do opatrywania drobnych ran powierzchniowych skóry. Składnik aktywny – mieszanka 80% alginatu wapnia i 20% alginatu sodu - tworzy nad raną mechaniczną warstwę proszku. Warstwa alginatu absorbuje ze zranionego miejsca krew i powstające wysięki, tworząc równocześnie chłodzący hydrożel, wspomagający proces gojenia. Wyciągi z rumianku pospolitego i nagietka lekarskiego dezynfekują ranę i działają przeciwzapalnie. Olej z rokitnika, aloe vera i wosk z jojoby wspomagają naturalne nawilżenie zranionego miejsca i przyspieszają proces gojenia. **SPOSÓB UŻYCIA** Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Pojemnik trzymać pionowo dnem do dołu. Preparat nanosić poprzez rozpylenie na dezynfekowane miejsce z odległości 15-20 cm od powierzchni ciała. Preparat stosować w ilości odpowiadającej wielkości rany tak, aby nie spływał z opatrywanego miejsca. Rozpylenie przez 2 sekundy pomaga nanieść około 1 g preparatu, co wystarcza na opatrzenie około 5 cm² rany. W razie konieczności można zabieg powtórzyć po wcześniejszym delikatnym oczyszczeniu zranionego miejsca. W celu utrwalenia powstałego hydrożelu zastosować Akutol spray opatrunek elastyczny.