

SALVEQUICK Transparent Aloe Vera Plastry 20 sztuk

Cena: 15,80 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 sztuk
Postać	plastry
Producent/ Dystrybutor	CEDERROTH POLSKA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Transparent Aloe Vera to przezroczysty i dyskretny plaster. Opatrunek zawiera wyciąg z aloesu znan ze swoich korzystnych właściwości. Ten oddychający plaster chroni przed wodą i brudem. Dobrze przylega do skóry. Elastyczny i rozciągliwy. Opakowanie zawiera 20 plastrów w trzech rozmiarach. **Jak stosować?** 1. Oczyszczyć ranę oraz skórę wokół i upewnić się, że jest sucha. 2. Upewnij się, czy nie jest zainfekowana. Przyklej plaster. 3. Codziennie zmieniaj plaster na nowy i przemywaj ranę, aby mieć pewność, że rana goi się prawidłowo i nie rozwija się zakażenie. Ponadto zmieniaj plaster, jeśli się zabrudzi lub przemoczy. **Kiedy stosować?** Plaster Transparent Aloe Vera przeznaczony jest do stosowania na niewielkie rany, np. na małe i powierzchniowe skaleczenia. **Zawartość opakowania** 6 x 25mm x 72mm 8 x 19mm x 72mm 6 x 16mm x 56mm