

Zestaw VACUTEST próżniowy do poboru moczu 1 sztuka



Cena: 7,61 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt. (zestaw)
Postać	pojemnik
Producent/ Dystrybutor	EL-COMP CEZARY KOSTUCH
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Zestaw Vacutest to próżniowy zestaw przeznaczony do pobrania próbki moczu do sterylnego pojemniczka, a następnie umieszczenie materiału drogą próżniową w probówce. Położeniu próbki do dedykowanego w pojemniku otworu następuje samoczynne wypełnienie. Metoda próżniowa wypełnienia probówki zapewnia sterylność procesu i gwarantuje pełną wiarygodności badania. Do laboratorium pacjent dostarcza tylko probówkę. **Sposób użycia** W celu uzyskania próbki do badania laboratoryjnego, przed użyciem należy dokładnie umyć ręce i części intymne. Założyć rękawiczki jednorazowe. Otworzyć wieczko odkręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odłożyć wieczko górną powierzchnią do dołu na czystą powierzchnię. Nie dotykać wewnętrznej powierzchni pojemnika i wieczka. Pobrać próbkę moczu. Pojemnik powinien zostać napełniony do 3/4 pojemności. Szczelnie dokręcić wieczko w kierunku ruchu wskazówek zegara. Delikatnie wstrząsnąć próbkę przed pobraniem jej do probówki. Częściowo unieść folię ochronną (nie zdejmować jej całkowicie). **WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ IGŁA, NIE WKŁADAĆ PALCA!** Włożyć probówkę. Delikatnie nacisnąć. Probówka musi pozostać zanurzona do momentu, aż się napelni (ustanie przepływ). Wyjąć probówkę i ponownie dokładnie nakleić folię ochronną. Probówkę z pobranym moczem delikatnie potrząsnąć, ok. 8-10 razy. Do laboratorium zanieść tylko probówkę.