

UniGel Apotex Procto 10 czopków

Cena: 61,90 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Holandia
Opakowanie	10 czopków
Postać	czopki do odbytnicze
Producent/ Dystrybutor	APOTEX NEDERLAND B.V.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

UniGel Apotex Procto to wyrób medyczny, który wspomaga proces gojenia zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy: - szczelin odbytu - hemoroidów - u pacjentów po zabiegu leczenia hemoroidów metodą Barrona (Ligatura Barrona).
Skład UniGel Apotex Procto to biały czopek o kształcie torpedy, zawierający sproszkowany kopolimer HEMA-HAS oraz bazę tłuszczową.
Zawartość 10 czopków
Sposób użycia - W miejscu perforacji blistra należy oddzielić jeden czopek od całego opakowania, lekkim szarpnięciem otworzyć jednostkowe opakowanie i wyjąć czopek. - Czopki wprowadza się do odbytnicy, o ile to możliwe, po wypróżnieniu i podmyciu się. - Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrzonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód. - Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, czopki UniGel Apotex Procto należy stosować raz na dobę, najlepiej przed snem. Producent / Podmiot odpowiedzialny: WAKE