

## Corega Komfort krem 40 g

Cena: 25,57 pln



### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent/ Dystrybutor	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Właściwości** Dzięki technologii ADAPTAGRIP Corega Komfort to więcej niż krem mocujący. Tworzy on aktywowany za pomocą wody żel, który zawiera karbomer i karboksymetylocelulozę. Dzięki temu zaczyna natychmiast działać, zapewniając Twoim dziąsłom ochronną warstwę amortyzującą oraz wygodne mocowanie protezy przez cały dzień. **Sposób użycia** 1. Oczyszczyć i osuszyć protezę. 2. Nałożyć produkt zgodnie z załączonym schematem - nie za blisko krawędzi protezy. Proteza górna: nanieść produkt w postaci jednego długiego paska, następnie uzupełnić go dwoma krótszymi paskami na środku protezy. Proteza dolna: nanieść produkt w postaci jednego długiego paska. Proteza częściowa: nałożyć dwa krótkie paski produktu. 3. Wypłucz usta przed założeniem protezy. 4. Dociśnij protezę do miejsc z nałożonym kremem mocującym, przytrzymaj mocno i zagryź protezę na kilka sekund.