

Corega Max Osłona krem do protez zębowych 40 g

Cena: 26,20 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent/ Dystrybutor	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Krem do protez **Corega Max Osłona** zapewnia zaawansowaną osłonę blokującą przedostawanie się drobinek jedzenia pod powierzchnię protezy. **Działanie** Uniemożliwia przedostawanie się resztek jedzenia pomiędzy protezę a szczękę zapobiegając tym samym powstawaniu stanów zapalnych. Tworzy specjalną powłokę zapobiegając powstawaniu uczucia bólu w miejscu ucisku protezy. Pozwala na spożywanie takich pokarmów, na jakie ma się ochotę. **Składniki** Calcium/Sodium PVM/MA Co-polymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia** 1. Protezę należy umyć i wysuszyć. 2. Nanosić krem na protezę w sposób pokazany na poniższym rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi 3. Górna proteza: Nanosić długi, ciągły pasek. Nanieść 2 krótsze paski w środku protezy. 4. Dolna proteza: Nanosić długi, ciągły pasek. 5. Proteza częściowa: Nanieść 2 krótkie paski. 6. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy. 7. Założyć protezę, docisnąć ją i przygrzyźć na kilka sekund dla pewnego mocowania.