

Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy krem do protez zębowych 40 g

Cena: 23,19 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Klej do protez Corega Super Mocny gwarantuje długotrwałe i pewne umocowanie protez zębowych - częściowych i pełnych. Krem do protez Corega Super Mocny uszczelnia je, zapobiegając tym samym przed przedostawaniem się pod nią resztek pokarmu, takich jak drobne nasiona czy mak. Umożliwia swobodne funkcjonowanie przez cały dzień, pozbawione obaw o przemieszczającą się protezę.

Działanie- Krem mocujący Corega zapewnia mocne utrzymanie protezy zębowej przez cały dzień.- Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię, nawet jeśli jest dobrze dopasowana i wykonana.- Tubka posiada unikalną końcówkę, która ułatwia aplikację kremu.

SkładnikiPoly(methylvinylether/maleic acid) sodium-calcium mixed partial salt, petrolatum blend W-180, carboxymethylcellulose sodium, mineral oil light, spray dried peppermint, spray dried spearmint, erythrosine lake paste, propylparaben

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użyciaUmyj i wysusz protezę.Nanieś kilka krótkich (6 mm) pasków kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.Wyplucz jamę ustną przed założeniem protezy.Założ protezę, dociśnij ją i na kilka sekund przygrzyź.