

## Dolphiner płyn/spray 0,1 ml 15 ml



Cena: 35,24 pln

### Opis słownikowy

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dawka                     | -                                      |
| Kraj produkcji            | Polska                                 |
| Opakowanie                | 15 ml                                  |
| Postać                    | aer.                                   |
| Producent/<br>Dystrybutor | AXPHARM SP. Z O.O.                     |
| Rejestracja               | Wyrób medyczny leczniczy               |
| Substancja<br>czynna      | Alcohol isopropylicus, Acidum aceticum |
| Wysyłka<br>zamówienia     | w 24 h                                 |

### Opis produktu

**Wskazania** w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapaleń przewodu słuchowego zewnętrznego, związanych z gromadzeniem się nadmiaru wody w przewodzie słuchowym zewnętrznym – tzw. „ucho pływaka”. Szczególnie zalecany po kąpieli w wannie, pod prysznicem, po pływaniu, osobom uprawiającym sporty wodne jak: nurkowanie, windsurfing, kitesurfing itp. **Działanie** Osusza przewód słuchowy z nadmiaru wody przywracający naturalnie kwaśne pH przewodu słuchowego. **Sposób użycia** Przed pierwszym użyciem nowego opakowania, należy wstrząsnąć buteleczką oraz nacisnąć aplikator 3-4 razy do pojawienia się preparatu. Końcówkę douszną aplikatora podczas naciskania należy trzymać skierowaną od siebie. To postępowanie przygotowuje dozownik do pierwszego, bezpiecznego użycia preparatu. Przed zaaplikowaniem preparat Dolphiner należy ogrzać w dłoni do temperatury ciała. W celu aplikacji, konieczne jest delikatne odciągnięcie małżowiny usznej do góry i do tyłu. Trzymając buteleczkę w pionowej pozycji, należy przybliżyć końcówkę douszną aplikatora do przewodu słuchowego zewnętrznego i nacisnąć 1 lub 2 razy, by preparat został podany do przewodu słuchowego. Aby uniknąć przypadkowych podrażnień, aplikator nie powinien być wprowadzany do przewodu słuchowego zewnętrznego. Należy powtórzyć te czynności dla drugiego ucha. Po użyciu, jeżeli końcówka douszna aplikatora miała kontakt z przewodem słuchowym zewnętrznym, można ją opłukać w gorącej wodzie. **Składniki** alkohol izopropylowy, kwas octowy, gliceryna farmaceutyczna, olejek mięty pieprzowej