


Plomb-R Pasta do tymczasowego wypełnienia zęba 3 g

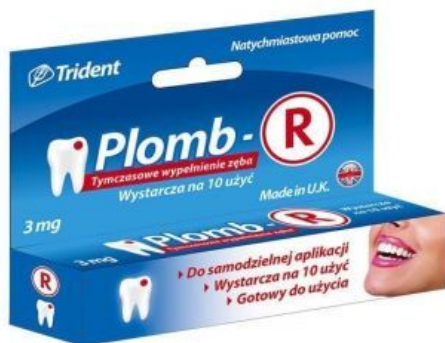

Cena: 55,60 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	3 g
Postać	pasta
Producent/ Dystrybutor	TRIDENT SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Tymczasowe wypełnienie zęba do samodzielnej aplikacji. Zabezpiecza ubytek przed drażniącymi bodźcami zewnętrznymi. Gotowe do użycia, wystarcza na ok. 10 aplikacji. Wyrób medyczny zabezpiecza ząb przed nadwrażliwością na zimno oraz przed czynnikami zewnętrznymi, jak bakterie i resztki jedzenia. Zabezpiecza również język i policzki przed ostrymi krawędziami szkliwa. Chroni przed bolesnym uciskiem na dziąsło w miejscu, gdzie brakuje zęba. **Sposób użycia** Wyciśnij niewielką ilość preparatu i włóż do zęba który wymaga wypełnienia. Delikatnie zagryź. Pasta stwardnieje w kontakcie ze śliną. Odczekaj minutę i przepłucz usta dokładnie ciepłą wodą. Przez co najmniej 15 minut nie zagryzaj i nie dociskaj wypełnienia w zębie. Jak najszybciej zgłoś się do stomatologa. Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 28 dni. **Składniki** Tlenek cynku 40 % i siarczan wapnia 30% pozostałą część stanowią plastyfikatory syntetyczne 15%, siarczan potasu 10%, siarczan magnezu 5% oraz śladowe ilości środków aromatycznych. **Informacje dodatkowe** Plomb-R jest w kolorze różowym ponieważ jest wypełnieniem tymczasowym, więc jego zadaniem nie jest estetyczny wygląd, lecz łatwa rozpoznawalność dla profesjonalistów. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować w przypadku stanu zapalnego miazgi zębowej, odstąpienia miazgi zębowej, patologicznej ruchliwości zęba oraz samoistnych bólach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.