

COREGA ULTRA HAFTCREME STARKER HALT Klej do protez 40g



Cena: 21,01 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Krem do protez zębowych bez cynku, zapewniający odpowiednie uszczelnienie brzegów protezy oraz jej pewne mocowanie. Uniemożliwia przedostawanie się resztek jedzenia pomiędzy protezę a szczękę zapobiegając tym samym powstawaniu stanów zapalnych. Zapewnia mocne, długotrwałe utrzymanie protezy zębowej. Poprawia stabilność protezy. Ponadto oferuje świeży smak mięty. Używaj codziennie kremu Corega mocującego do całkowitych i częściowych protez zębowych, który mocuje, protezę w trzech kierunkach 3D Halt : przód-tył, góra-dół i na boki oraz pomaga blokować przedostawanie się pod protezę drobinek jedzenia. Zyskasz pewność i spokój na cały dzień, ponieważ krem Corega Super Mocny pomaga dokładnie mocować protezę. Użyj początkowo jak najmniejszą ilość kleju. W razie potrzeby ją zwiększ. Zbyt duża ilość kleju powoduje boczne obrzęki. Jeśli pęcznieje, zmniejsz ilość kleju, aż znajdziesz odpowiednią dawkę. Stosuj tylko raz dziennie. **Sposób aplikacji kremu** 1. Protezę należy umyć i wysuszyć. 2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. 3. Wypluć jamę ustną przed założeniem protezy. 4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygrzyźć na kilka sekund.