

# Sanity Gruszka XL do zaparc dla dorosłych i dzieci powyżej 3 lat



Cena: 30,79 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

**Gruszka z kanką** przeznaczona jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 3. roku życia w celu łagodzenia zaparc, kolek brzusznych, przed zabiegami chirurgicznymi w okolicach jamy brzusznej. **Sposób użycia** Przed pierwszym użyciem gruszkę i kankę wygotować w wodzie przez 10 minut. Po wygotowaniu i osuszeniu obie części połączyć ze sobą. Gruszkę napełnić cieczą płuczącą. Końcówkę nasmarować wazeliną i delikatnie wprowadzić do odbytu. Naciskać gruszkę tak, aby płyn powoli przedostawał się do jelita. Ścisnąć pośladki, wyjąć kankę z odbytu. Pośladki pozostawić ściśnięte przez pewien czas, aby umożliwić rozpuszczenie zalegających treści jelitowych. Po użyciu rozmontować części i starannie wymyć w gorącej wodzie z mydłem, a następnie wygotować przez 10 minut.