

# Chicco laktator manualny Naturalfeeling + wkładki laktacyjne 60 sztuk



Cena: 247,12 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 opakowanie
Postać	laktator
Producent/ Dystrybutor	ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

Zestaw zawiera Laktator manualny **Naturalfeeling Chicco** oraz wkładki laktacyjne Chicco 60 szt. Laktator ręczny Chicco jest pomocny w wspieraniu karmienia piersią kiedy występuje nadmiar mleka lub kiedy karmienie piersią nie jest możliwe. W tych przypadkach można odciągać pokarm, przechować i podać je dziecku kiedy wystąpi taka potrzeba. Laktator zawiera: Tłok Uchwyt Miękką silikonową nakładką Korpus Lejka Adapter Naturalfeeling Zawór Butelka Naturalfeeling 9 Butelka Wellbeing Podstawka **Sposób użycia** Umyć ręce i opłukać piersi wodą lub przetrzeć praktycznymi chusteczkami Chicco do pielęgnacji piersi. Aby ułatwić przepływ mleka, można wziąć gorący prysznic lub przyłożyć ciepły ręcznik do piersi tuż przed odciąganiem mleka lub przed karmieniem piersią. Usiąść w wygodnej pozycji. Dobrze przypasować lejek do piersi upewniając się, że brodawka znajduje się na samym jego środku. Używanie laktatora jest możliwe zarówno z użyciem miękkiej silikonowej nakładki, jak i bez niej. Zaleca się wypróbować obie konfiguracje i wybrać tę najbardziej odpowiednią i wygodną. Delikatnie nacisnąć na uchwyt, aż na piersi poczuje się odsysanie, a następnie zwolnić go. Można regulować nacisk na uchwyt w zależności od siły ciągu wywieranej na pierś lub w zależności od wyptywającego mleka: może okazać się niepotrzebne naciskanie uchwytu do końca. Rozpocząć szybkim ruchem, energicznie naciskając i zwalniając uchwyt, aby stymulować odciąganie mleka. Kiedy mleko zacznie spływać, naciskać na uchwyt w wolniejszym rytmie, przytrzymując go na 1-2 sekundy, a następnie zwalniać. Mleko można odciągać na przemian z obu piersi. Aby podać dziecku mleko zaraz po jego odciągnięciu, należy założyć na butelkę nakrętkę ze smoczkiem. W ten sposób uzyska się wygodną butelkę (Wellbeing lub Naturalfeeling), gotową do użycia. Zamykając butelkę praktyczną, hermetyczną zakrętką (w zestawie), odciągnięte mleko można przechowywać w lodówce przez maksymalnie 48 godzin i przez 3 miesiące w zamrażalniku.