


MENOPAUAZA Test płytkowy 2 sztuki

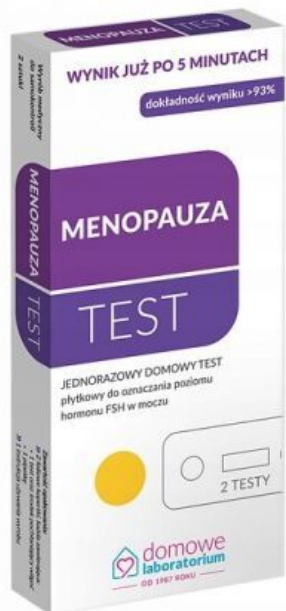

Cena: 37,04 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	2 sztuki
Postać	test płytkowy
Producent/ Dystrybutor	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Menopauza Test płytkowy jest szybkim testem wykrywającym w moczu hormonu FSH o stężeniu 25mIU/ml lub wyższym. Badanie najlepiej wykonywać z pierwszego porannego moczu, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu FSH. Wynik w postaci barwnych prążków pojawia się w ciągu ok. 3 minut. Wynik dodatni oznacza, że poziom hormonu FSH jest wyższy niż normalnie i możesz być w stadium perimenopauzy lub że menopauza już wystąpiła. Dla pewności wykonujemy drugi test. Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że dokładność testu Menopauza Test wynosi 99,9%. **Zastosowanie** Wykrycie w moczu hormonu FSH o stężeniu 25mIU/ml lub wyższym. **Sposób użycia** Przed wykonaniem badania należy przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku test. Jeśli miesiączkujesz regularnie, ale obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy użyć w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego, tzn. w czasie od 2-go do 7-go dnia twojego cyklu (1-szy dzień cyklu jest pierwszym dniem krwawienia miesięcznego). Badanie drugim testem z opakowania należy wykonać dokładnie tydzień później. Jeśli miesiączkujesz nieregularnie (między miesiączkami występują nawet dłuższe przerwy) i obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy wykonać w dowolnym dniu miesiąca i powtórzyć badanie przy użyciu drugiego testu z opakowania dokładnie tydzień później. **Zawartość opakowania**- 2 aluminiowe szczelnie zamknięte kopertki, w każdej znajdują się: 1 test płytkowy, 1 pipetka i 1 środek pochtaniający wilgoć.- 1 instrukcja używania wyrobu.