

Corega Original extra silny krem do protez XL 70g

Cena: 29,79 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	70 g (tuba)
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Corega extra silny XLKrem mocujący Corega gwarantuje mocne utrzymanie protezy zębowej przez cały dzień. Nie posiada w składzie cynku. Krem Corega uszczelnia protezę a także zapobiega przedostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię, nawet jeśli jest dobrze wykonana i dopasowana. Tuba z kremem posiada precyzyjną końcówkę, ułatwiającą aplikację kremu. Corega dodaje pewności siebie przez cały dzień. Składniki: Calcium-sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430. **Sposób użycia** Wskazówki dotyczące aplikacji kremu mocującego: Umyj i dokładnie osusz protezę. Aby uzyskać jak najlepszy efekt czyszczenia zaleca się używanie tabletek Corega Tabs. Nanieś kilka krótkich pasków (6 mm) kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. Wypłucz jamę ustną przed założeniem protezy. Załóż protezę, dociśnij ją, następnie na kilka sekund przygrzyź. Aby zapewnić mocne utrzymanie protezy krem należy stosować raz dziennie. **Ostrzeżenia** Krem może powodować nadwrażliwość lub uczulenie u niektórych osób. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu zaleca się natychmiastowe przerwanie stosowania produktu.