

Kelatis spray 100 ml



Cena: 55,71 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	100 ml
Postać	spray
Producent/ Dystrybutor	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Kelatis to absorbujący proszek mineralny w sprayu zawierający 2,5% srebra jonowego. Przy stosowaniu na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. Obecność jonów srebra zapobiega zakażeniu drobnoustrojami. Produkt pozostaje w miejscu zastosowania, nie ściera się i można go łatwo usunąć przy pomocy roztworu soli fizjologicznej. W razie potrzeby, należy zabezpieczyć ranę za pomocą jałowego gazika lub przepuszczającego powietrze opatrunku. Kelatis spray pozostaje w miejscu zastosowania, nie ściera się i można go łatwo usunąć przy pomocy roztworu soli fizjologicznej.

Wskazania Do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia i skaleczenia skóry. **Działanie** Kelatis spray z jonami srebra: - przyspiesza gojenie - chroni przed zakażeniem - łagodzi ból **Skład** mikronizowany zeolit, srebro jonowe, n-butan **Sposób użycia** Przed zastosowaniem preparatu Kelatis ranę należy oczyścić za pomocą roztworu izotonicznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać w krótkich odstępach czasu, lekko naciskając na przycisk dozownika i kierując spray na ranę. Powtórzyć - w razie potrzeby, przykryć ranę jałowym opatrunkiem. **Ostrzeżenia** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie rozpylać w powietrze. Produkt łatwopalny. Tylko do użytku zewnętrznego **Skład** mikronizowany zeolit, srebro jonowe, n-butan **Sposób użycia** Przed zastosowaniem preparatu Kelatis ranę należy oczyścić za pomocą roztworu izotonicznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać w krótkich odstępach czasu, lekko naciskając na przycisk dozownika i kierując spray na ranę. Powtórzyć - w razie potrzeby, przykryć ranę jałowym opatrunkiem. **Ostrzeżenia** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie rozpylać w powietrze. Produkt łatwopalny. Tylko do użytku zewnętrznego