

Visoftan Care Chusteczki sterylne 20 sztuk

Cena: 39,91 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 sztuk
Postać	chusteczki
Producent/ Dystrybutor	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Visoftan Care chusteczki sterylne do oczyszczania okolic oczu to wyrób medyczny dla dorosłych i dzieci, przeznaczony do oczyszczania obszaru wokół oka, stosowany również przed i po zabiegach chirurgicznych oka. Preparat wykazuje skuteczność w przypadku wystąpienia zapalenia oka, infekcji lub alergii, wydzieliny z oka, objawów infekcji lub alergii na skutek zmian patologicznych oraz do czyszczenia okolic oka. Sól sodowa kwasu hialuronowego jest jednym z głównych składników macierzy pozakomórkowej większości tkanek. Dzięki jej zdolności do zatrzymywania wody oraz właściwościom błonotwórczym działa ona nawilżająco i ochronnie. **Działanie** Substancje zawarte w produkcie umożliwiają staranne oczyszczenie obszaru oka oraz okolic wokół oka, co sprawia, że Visoftan Care może być stosowany wspomagająco w trakcie leczenia oka zaleconego przez lekarza. Składniki Visoftan Care wykazują właściwości oczyszczające, nawilżające, ochronne i łagodzące, dzięki czemu wyrób ten jest niezwykle delikatny i odpowiedni do wrażliwej skóry okolic oczu. **Składniki** Gaza ze 100-procentowej bawełny, nasączona 3 ml następującego roztworu: woda, PEG/PPG-20/15 poli(dimetylosiloksan) (dimetykon), wyciąg z kwiatów rumianku pospolitego (*Chamomilla recutita*), glikol propylenowy, wyciąg ze świetlika lekarskiego (*Euphrasia officinalis*), hialuronian sodu, sól amonowa kwasu glicyryzynowego, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kwasów tłuszczowych oleju kokosowego i aminokwasów z pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenylotetylowy, chlorek sodu, wodorowęglan sodu **Stosowanie** Dokładnie umyć ręce. Otworzyć saszetkę i wyjąć gazę. Starannie oczyścić okolice oka za pomocą gazy w celu usunięcia wydzieliny lub wszelkich innych pozostałości (zanieczyszczeń, pyłków itp.) dzięki delikatnemu działaniu zmiękczającym składników produktu. W przypadku wystąpienia trudnych do usunięcia pozostałości lub zatkania kanałka łzowego zaleca się ogrzewać saszetkę w ciepłej wodzie (o temperaturze 40°C) przez kilka minut, a następnie użyć gazy jako ciepłego kompresu, jednocześnie wykonując nią delikatny masaż. Dodatkowo można wycisnąć zawartość gazy na oko, delikatnie pochylając głowę, a następnie masować ten obszar gazą aż do całkowitego usunięcia pozostałości. W przypadku zapalenia oka zaleca się włożyć szczelnie zamkniętą saszetkę na kilka godzin do lodówki, a następnie nałożyć schłodzoną gazę na oko i pozostawić ją na kilka minut. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Wyrób jednorazowego użytku. Przechowywać z dala od dzieci. Sterylność wyrobu jest gwarantowana jedynie wówczas, gdy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Do użytku zewnętrznego. Przerwać stosowanie w razie wystąpienia wyraźnego podrażnienia lub nadwrażliwości na produkt. Działanie i

bezpieczeństwo produktu jest gwarantowane jedynie w przypadku nieuszkodzonego opakowania. Uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.