

Opaska elastyczna P.TERESA staw kolanowy M 1 szt.



Cena: 37,77 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	Opaska
Producent/ Dystrybutor	SIGVARIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo - reumatycznych stawu kolanowego po zdjęciu opatrunków gipsowych – wzmacnia i stabilizuje kolano przed i po operacjach uszkodzonych łąkotek w przypadkach zwicnięć lub obrażeń kolana zapobiega obrzękom, łagodzi ból, wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym. **Tabela rozmiarów** **Obwód nogi nad kolanem [cm]** S - 30 – 38 M - 39 – 47 L - 48 – 54 XL - 55 – 63 XXL - > 63 **Dopasowanie rozmiaru** W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. **Sposób zakładania** Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego. Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.