

Corega Power Max Mocowanie + Komfort 40g

Cena: 26,20 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent/ Dystrybutor	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Krem COREGA MAX MOCOWANIE + KOMFORT poprawia komfort codziennego użytkowania protez częściowych lub całkowitych, dzięki mocnej jej stabilizacji w jamie ustnej. Ponadto, zabezpiecza przed przedostawaniem się drobinek jedzenia pod płytę protezy.- Krem mocuje protezę nawet na 12 godzin- Precyzyjny aplikator umożliwi naniesienie odpowiedniej ilości produktu.- Chroni dziąsła przed naciskiem.**Stosowanie**Oczyść i osusz protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe! Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezą.**Składniki**Guma celulozowa, wazelina, parafina płynna, Kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, karbomer.