

Katarek Standard aspirator kataru 1 sztuka

Cena: 66,97 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	aspirator
Producent/ Dystrybutor	DUNA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Aspirator Katarek Standard to aspirator przeznaczony do odciągania wydzieliny z nosa dziecka w czasie kataru. Aspirator Katarek Standard ułatwia oddychanie, zapobiegając możliwym dalszym powikłaniom. Może być stosowany w przypadku kataru infekcyjnego: wirusowego/bakteryjnego, w alergicznym nieżycie nosa. Aspirator Katarek Standard podłączany jest do odkurzacza o mocy 800–1800W. Jednostajna siła ssąca odkurzacza umożliwia skuteczne oczyszczenie noska. Znajdujący się w komorze mechanizm redukcji siły sprawia, że siła odkurzacza nawet przy mocy 1800W zostaje zredukowana, dzięki czemu jest bezpieczny dla niemowląt już od pierwszego dnia życia. Aspirator Katarek Standard może być użyty już od 1 dnia życia do 6 roku życia. **Sposób użycia** Do komory aspiratora dołącz końcówkę. Stożkowy koniec aspiratora włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800 – 1800W). Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Końcówkę przyłóż do otworu nosowego i odciągaj katar 5 – 10 sekund. Czynność powtórz na drugiej dziurce. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami. Utrzymanie aspiratora w czystości: Części aspiratora każdorazowo umyć pod ciepłą wodą z mydłem lub płynem do naczyń. Do usunięcia trudniejszych zabrudzeń można użyć szczoteczki dołączonej do zestawu. Nie stosować silnych środków dezynfekujących. **Działanie** Aspirator Katarek Standard ułatwia pielęgnację dziecięcego nosa podczas infekcji górnych dróg oddechowych. **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C Producent / Podmiot odpowiedzialny: ILLES **Zawartość** Aspirator kataru Katarek Standard zawiera: - Katarek Standard, - końcówki do aspiratora Katarek Standard x2, - szczoteczka druciana do czyszczenia końcówek- komory x1.