

Kałszyk zestaw do pobierania próbek kału 1 sztuka



Cena: 5,77 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	zestaw
Producent/ Dystrybutor	EL-COMP CEZARY KOSTUCH
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Zestaw do pobierania próbek kału do analizy składa się z pojemnika na kał, rękawiczek oraz koszyczka ułatwiającego pobranie próbki, który przykleja się na deskę sedesową, a po pobraniu materiału łatwo odkleja. Koszyczek wykonany jest z atestowanego papieru biodegradowalnego, można go spłukać razem z kałem bez obaw o środowisko. Zestaw jest komfortowy i higieniczny. **Sposób użycia** wyjąć z woreczka papierowy koszyczek, rozłożyć koszyczek i odkleić ze skrzydełek białe paski papieru chroniące klej, przykleić skrzydełka dookoła muszli tak, aby koszyczek pozostał otwarty, potem opuścić deskę, po oddaniu kału, przy pomocy łopatki zamocowanej na wieczku pobrać próbkę kału do pojemnika, zatrzasknąć pojemnik z próbką, odkleić koszyczek wraz z zawartością, odczekać pół minuty i spłukać. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Zawartość** 1 zestaw