


## Test antygenowy SGTi-Flex COVID-19 Ag 1 szt.

Cena: 40,45 pln

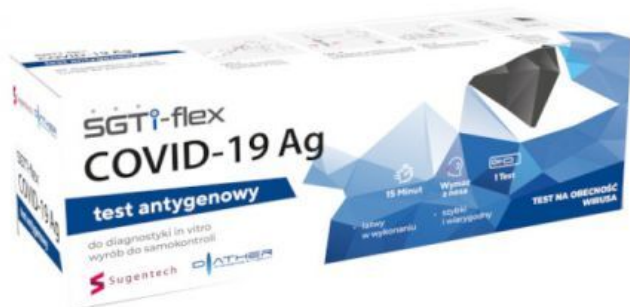

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	test
Producent/ Dystrybutor	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

SGTI-FLEX COVID-19 Ag to test antygenowy przeznaczony do wykrycia obecności antygeny wirusa SARS-CoV-2. Za pomocą testu stwierdza się zakażenie SARS-CoV-2, co jest pomocne w diagnozowaniu COVID-19. W czasie testu próbka z materiałem badanym (wymaz z nosa), poddana jest reakcji ze swoistymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko antygenom wirusa SARS-CoV-2. Membrana nitrocelulozowa kasety testowej zawiera linię testową i linię kontrolną. Test do samokontroli. Wynik testu odczytuje się w czasie 15-30 minut. Test do samokontroli jest bezpieczny, o ile wykonywany zgodnie z zawartą w instrukcji procedurą wykonania testu. Pobranie wymazu z nosa jest w pełni bezpieczne, ponieważ wymaz jest pobierany z przedniej części nosa. O czym świadczy pozytywny wynik testu SGTI-FLEX COVID-19 Ag? Pozytywny wynik testu antygenowego świadczy o aktualnie trwającej infekcji wirusem SARS-CoV-2. **Jak wykonać domowy test na Covid-19 SGTI-FLEX?** Pobierz próbkę wymazu z nosa. Przygotuj próbkę i nałóż końcówkę zakraplającą. Zaaplikuj próbkę na kasetę testową. Odczekaj 15 minut, sprawdź wynik. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Wynik pozytywny oznacza, że test wykrył antygen wirusa, skontaktuj się z lekarzem, aby pokazać wynik badania. Następnie lekarz zadecyduje, czy należy wykonać dodatkową diagnostykę. Obecność wirusa niekoniecznie oznacza, że rozwinie się u Ciebie ciężka postać choroby, ale należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć przeniesienia wirusa na inne osoby. Tylko lekarz może postawić diagnozę na podstawie badania lekarskiego i dodatkowych wyników badań. **Zawartość** Opakowanie domowego testu na Covid-19 zawiera materiały niezbędne do wykonania badania: kasetę testową: 1 sztuka, bufor ekstrakcyjny: 1 sztuka (0,3 ml/probówkę), końcówka zakraplająca: 1 sztuka, wymazówka do pobrania próbki: 1 sztuka, instrukcja użycia: 1 sztuka.