

## Plastry na pęcherze Cosmos (3 rozmiary) 6 sztuk

Cena: 26,51 pln



### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plastry
Producent/ Dystrybutor	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Cosmos plastry hydrokolooidowe dla ochrony i leczenia pęcherzy. Opakowanie zawiera plastry w trzech różnych rozmiarach ułatwiających dopasowanie do wielkości pęcherza. Plastry zabezpieczają zranioną skórę, wspomagają jej regenerację i uśmierza ból, dodatkowo są wygodne w noszeniu. **Wskazania** Do ochrony i leczenia pęcherzy. **Właściwości** plaster z hydrokolooidową powłoką pochłania nadmiar wysięku i przekształca go w żelowo-podobną substancję, co amortyzuje uszkodzony obszar i niweluje tarcie oraz ucisk przyjazny dla skóry. **Sposób użycia** 1. Umyj dłonie, dokładnie je osusz. Oczyszcz i osusz skórę w miejscu aplikacji plastra. 2. Wymij plaster z opakowania i ściągnij folię ochronną. 3. Naklej plaster na pęcherz, delikatnie przyciśnij i wymodeluj jego brzegi, by zoptymalizować przyleganie do skóry. 4. Plaster należy usunąć dopiero wtedy, gdy zacznie się sam odklejać lub po 4 dniach od zaaplikowania.