

SALVEQUICK Blister Prevention Heels Plastry na pięty 6 sztuk

Cena: 31,04 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plastry
Producent/ Dystrybutor	CEDERROTH POLSKA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Blister Prevention Heels to plaster na pęcherze wykonany ze specjalistycznego materiału hydrokoloidowego. Natychmiast zmniejsza ucisk i tarcie. Ten plaster na pęcherze przeznaczony jest do zapobiegania tworzeniu się pęcherza. Opakowanie zawiera 6 plastrów na pęcherze specjalnie dostosowanych do pięt. **Jak stosować?** 1. Przemyj ranę i skórę wokół letnią wodą lub płynem do przemywania ran. 2. Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha, czysta i nietłusta, wolna od emulsji i balsamów. 3. Usuń zadrukowany papier ochronny z plastra. 4. Oderwij połowę folii wzdłuż perforacji. 5. Usuń plaster z folii i przyłóż go do środka pęcherza. Pozostaw plaster do czasu, aż sam się odklei. Aby łatwo usunąć plaster pociągnij go z jednej strony i rozciągnij ostrożnie równoległe do skóry. **Kiedy stosować?** Ten plaster na pęcherze przeznaczony jest do zapobiegania tworzeniu się pęcherza – do stosowania zanim pojawi się pęcherz lub gdy pojawiło się zaczerwienienie na skórze. Uwaga: osoby z zaburzeniami procesu gojenia się ran, np. chorzy na cukrzycę, osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać miejsce pęcherza. Nie stosować na krwiste lub głębokie, mocno krwawiące lub zainfekowane pęcherze. **Zawartość opakowania** 6 x 40mm x 61mm