

SALVEQUICK MED Wart Plastry na kurczajki 20 sztuk

Cena: 42,15 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 sztuk
Postać	plaster
Producent/ Dystrybutor	ORKLA CARE S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Wart Plaster to plaster z kwasem salicylowym, który pomaga usunąć kurczajki na podeszwie stopy. Ta metoda leczenia kurczajek jest zarówno skuteczna, jak i bezbolesna: kwas salicylowy umieszczony wewnątrz plastra uszkodza komórki skóry na kurczajce bez oddziaływania na skórę wokół. Jeśli masz kurczajkę na podeszwie stopy, możesz użyć ochronnego plastra na kurczajki w celu jej usunięcia, jednocześnie zapobiegając rozprzestrzenianiu się infekcji. Opakowanie zawiera 20 plastrów na kurczajki. Im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej pozbędziesz się kurczajki. **Jak stosować?** 1. Przed aplikacją namoczyć kurczajkę w ciepłej wodzie przez 5 minut. 2. Oczyszczyć i osuszyć skórę, upewniając się, że miejsce aplikacji plastra nie jest natłuszczone kremem ani olejkami. 3. Usunąć papier zabezpieczający, unikając dotykania strony adhezyjnej plastra. 4. Nałożyć plaster z opatrunkiem z kwasem salicylowym bezpośrednio na kurczajkę, tak aby jego centralna część znajdowała się na kurczajce, upewniając się, że krawędzie plastra dobrze przylegają do skóry. 5. Pozostawić na miejscu, aż plaster zacznie odstawać. Po maksymalnie 48 godzinach należy usunąć plaster. 6. Przed usunięciem kurczajki namoczyć zmieniony obszar skóry w ciepłej wodzie przez 5 minut. 7. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nie stosować dłużej niż 14 dni. Uwaga! Użycie plastra u dziecka lub przez kobietę w ciąży wymaga konsultacji z lekarzem. Plastrów nie powinny stosować osoby chore na cukrzycę, osoby z nadwrażliwością na kwas salicylowy oraz osoby ze słabym krążeniem krwi.

Zawartość opakowania 20 sztuk